


# Attends® For Men

Level 1 & 2




## Pukemisohje

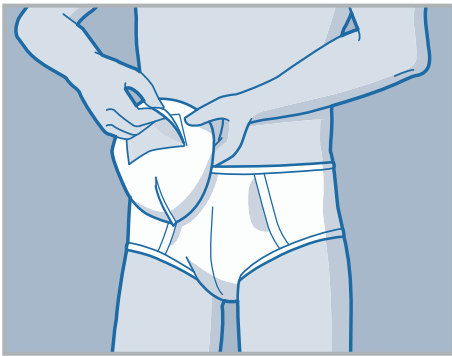

**1** Varmista, että tuote on taitettu auki niin, että leveämpi puoli on ylhäällä (kuten suojapaperin nuolet näyttävät). Poista suojapaperi.



**2** Kiinnitä suoja alusvaatteisiisi ja tarkista, että kuppimainen muoto säilyy, kun se kiinnitetään.

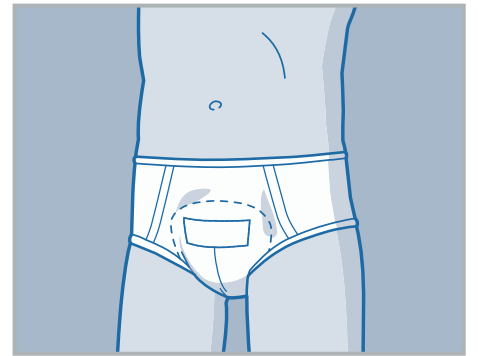

**3** Kiinnitä suoja liimaraidan avulla napakasti istuviin alusvaatteisiin. Varmista ettei liimaraita joudu kosketuksiin ihon kanssa.

## Neuvoja ja vinkkejä

### Tuotevalikoima

- Valitse suojan imukyky käyttäjän tarpeiden mukaan.
- Käytä tippasuojan kanssa ihonmyötäisiä alusvaatteita parhaan tuloksen varmistamiseksi.
- Emme suosittele suojien käyttöä bokserien kanssa.

### Hävittäminen

- Rullaa suoja ja hävitä se toimipisteesi ohjeiden mukaisesti.
- Älä vedä suojaa vessasta.



Attends For Men - suojat on proDERM-testattu ja hyväksytty dermatologista tutkimusta tekevän instituutin toimesta.


Lisätietoja saadaksenne, vieraillkaa [www.attends.fi](http://www.attends.fi)

# Attends® For Men

Level 3 & 4




## Pukemisohje

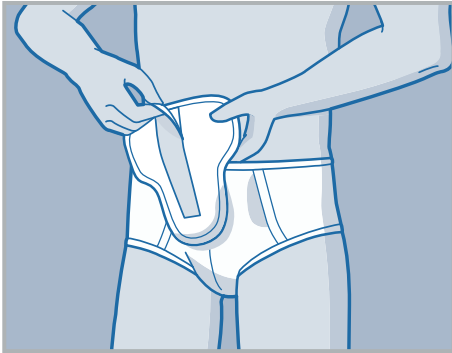

1 Varmista, että tuote on taitettu auki niin, että leveämpi puoli on ylhäällä (kuten suojapaperin nuolet näyttävät). Poista suojapaperi.



2 Taita suoja kuppimaiseksi varmistaaksesi, että vuotosuojat asettuvat luonnollisesti suojan mukana, ilman eri asettelua. Kiinnitä suoja alusvaatteisiisi samalla varmistaen, että kuppimainen muoto säilyy.

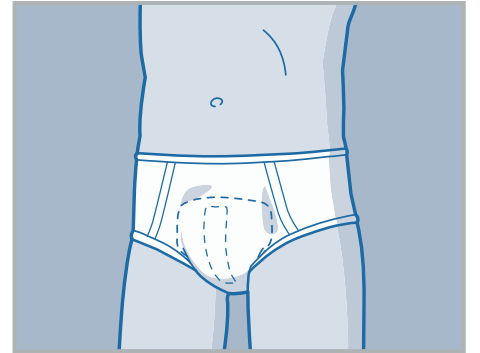

3 Kiinnitä suoja liimaraidan avulla napakasti istuviin alusvaatteisiin. Varmista ettei liimaraita joudu kosketuksiin ihon kanssa.

## Neuvoja ja vinkkejä

### Tuotevalikoima

- Valitse suojan imukyky käyttäjän tarpeiden mukaan.
- Käytä tippasuojan kanssa ihonmyötäisiä alusvaatteita parhaan tuloksen varmistamiseksi.
- Emme suosittele suojiin käyttöä bokserien kanssa.

### Hävittäminen

- Rullaa suoja ja hävitä se toimipisteesi ohjeiden mukaisesti.
- Älä vedä suoja vessästä.



Attends For Men - suojat on proDERM-testattu ja hyväksytty dermatologista tutkimusta tekevän instituutin toimesta.

Lisätietoja saadaksenne, vierailkaa [www.attends.fi](http://www.attends.fi)